

LANCETAS ACCU-CHEK SOFTCLIX:

Compatibilidad:

Las lancetas sólo se pueden utilizar con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix.



Beneficios y características

- Punta esterilizada en forma de diamante y cubierta de silicón
- Disminuyen el dolor de la punción
- Su sistema de punción extrae fácilmente sangre capilar de la yema del dedo.
- Mayor facilidad de uso, cuenta con capuchón de seguridad.
- La avanzada tecnología Clixmotion® evita la oscilación de la lanceta y con ello la ruptura innecesaria de tejidos.
- Penetración a gran velocidad con retracción activa de la aguja
- No hay contacto con la lanceta, se podrá insertar y retirar fácilmente sin ningún riesgo

ESPECIFICACIONES

Diámetro de lanceta	0.4 mm
Calibre	28
Revestimiento	Silicona
Presentaciones	Caja con 200, 100 y 25 lancetas
Tecnología Clixmotion®	Sin vibración al entrar o salir
Penetración	De 0.8 a 2.3 mm
Seguridad	Cubierta protectora evita lesiones y accidentes

Almacenamiento y manejo:

- No guarde las lancetas a temperaturas extremas, por ejemplo, en un coche caliente. Esto puede perjudicar el funcionamiento de las lancetas.
- Utilice siempre una lanceta nueva para la extracción de sangre. De este modo, reducirá el riesgo de infección y la obtención de sangre seguirá siendo prácticamente indolora.
- Introduzca únicamente lancetas Accu-Chek Softclix en el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix. Otras lancetas pueden perjudicar el funcionamiento del dispositivo de punción o dañarlo permanentemente.
- Si el capuchón protector está dañado o falta, la aguja puede no estar esterilizada y provocar una infección. Inspeccione visualmente la lanceta. Si el capuchón protector está deformado, agrietado o dañado de alguna otra forma, no utilice la lanceta. Si falta el capuchón protector o cualquier parte de la aguja está expuesta, no utilice la lanceta. Deseche la lanceta.
- Si la fecha de caducidad de la lanceta ha expirado, la lanceta puede no estar esterilizada. Inserte únicamente lancetas cuya fecha de caducidad no haya vencido. La fecha de caducidad está impresa junto al símbolo del reloj de arena en el envase.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden tragarse. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños y de las personas que puedan tragárselas.
- Visite [SafetyIsThePoint.org](https://www.safetyisthepoint.org) para obtener información sobre la eliminación de objetos punzantes.